

VDS

VITALI DESINFEKTIONS-SYSTEM

ZERTIFIZIERTES
DESINFEKTIONS-SYSTEM
FÜR DENTALEINHEITEN



LIFELONG DENTAL UNITS

VITALI

www.vitali.com


VDS

Die beste Lösung für die Desinfektion von Dentaleinheiten MADE BY VITALI

Das **VDS** (Vitali Desinfektions-System) ist ein hocheffizientes Reinigungs- und Desinfektionssystem für Dentaleinheiten. Das System wurde von unserer Forschungsabteilung entwickelt und durch führende externe Labors getestet.


VDS ist ein medizinisches Gerät, das Technologie, Know-how und anerkannte Prüfmethode perfekt miteinander vereint. Das **VDS** reduziert effizient und sicher den Bakteriengehalt im Wasserkreislauf der Dentaleinheiten und beugt die Bildung des Biofilms vor. Das Desinfektionslösung **Multiclean** wird ebenfalls zur Keimreduktion eingesetzt und bekämpft erfolgreich Viren und Bakterien, wie z.B. Legionella Pneumophila, Pilze, HIV, HBV und Hepatitis-C-Viren.

Auf Anfrage kann das **VDS** bei allen **VITALI** Dentaleinheiten installiert werden. Wichtig ist, dass das System direkt bei der Herstellung eingebaut wird, da es bei bereits ausgelieferten Einheiten nicht mehr nachträglich installiert werden kann.

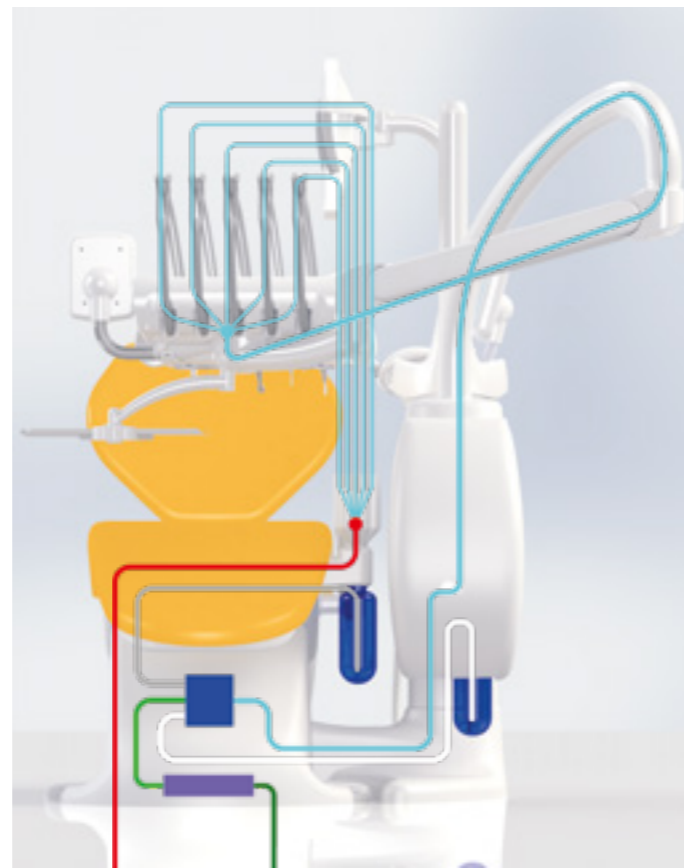

VDS

Die Elemente des VDS im Detail

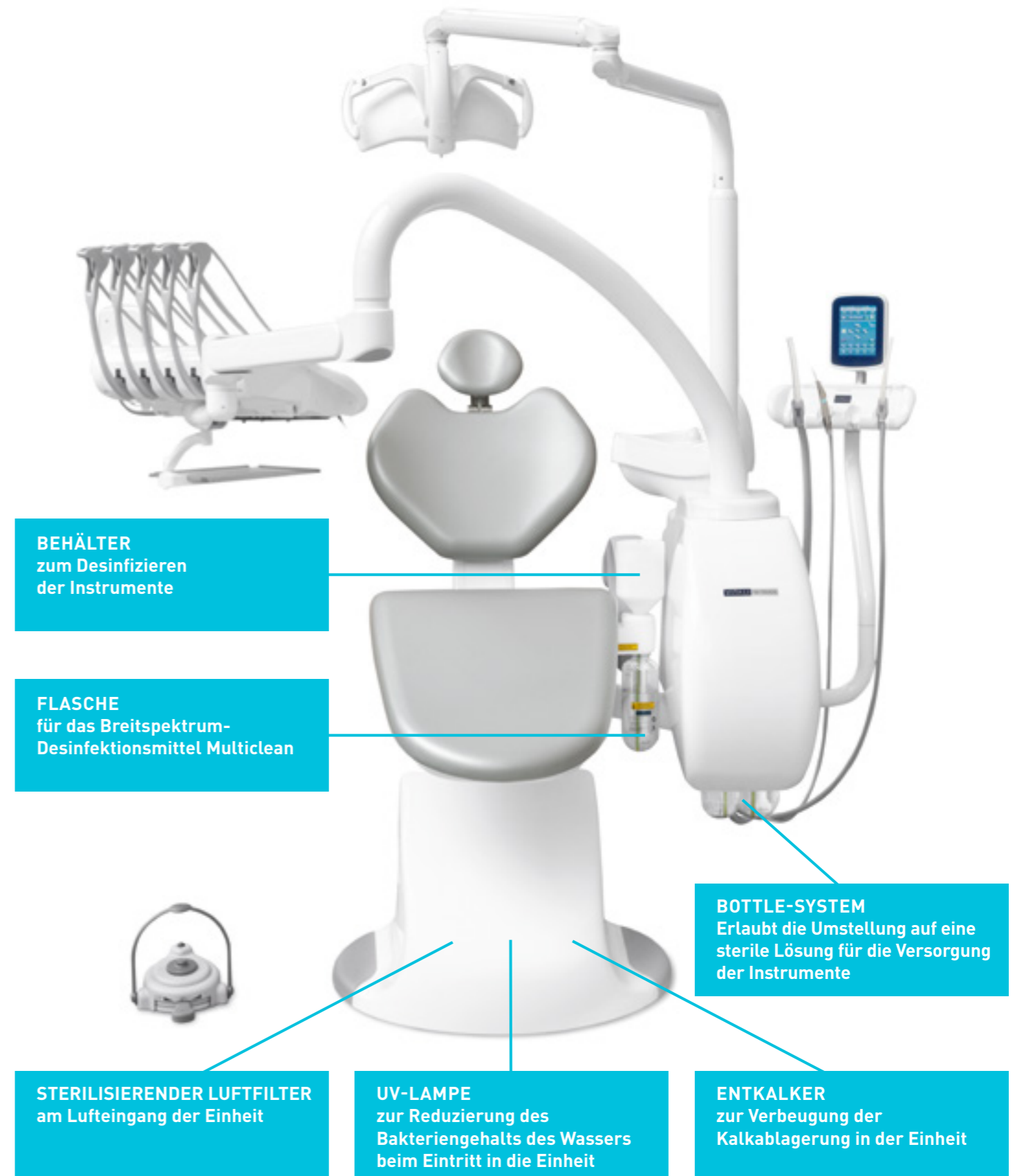



Standardeinstellung des Behälters und Flasche des Desinfektionsmittel Multiclean



Position des Behälters, falls das Speibecken mit einem Abflussventil ausgestattet ist



UV-Lampe, Entkalker und Filter zur Luftsterilisation



Bottle-System für die physiologische Lösung

VDS

Entdecken Sie das VDS Funktionsprinzip

- Einfach** > Das **VDS** funktioniert vollautomatisch, ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet und extrem leicht zu bedienen.
- Sicher** > Für Ihre Sicherheit und die Ihrer Assistenten bzw. Patienten sollten Sie nach jeder zahnärztlichen Behandlung den kompletten Wasserkreislauf der Einheit reinigen.
- Praktisch** > Positionieren Sie die Instrumente in dem Behälter, öffnen Sie die Sprühfunktionen an der Funktionsspritze und starten Sie den Reinigungszyklus per Knopfdruck.
- Schnell** > Sie können zwei Zyklen einstellen: **FAST** mit einer Dauer von 5 Minuten und **SLOW** mit einer Dauer von 10 Minuten. In dem **T5 MASTER** und **T5 EVO PLUS** können alle Funktionen über ein externes Bedienfeld eingestellt werden; beim **V8 TOUCH** direkt auf der Tastatur des Touch Bildschirms.
- Geschützt** > Für höchste Sicherheitsansprüche, wie z.B. bei chirurgischen Eingriffen, kann dank dem **VDS** anstatt dem Trinkwasser eine sterile Lösung für die Instrumente verwendet werden. Mithilfe dieser Vorrichtung können Infektionsrisiken sicher ausgeschlossen werden.




Bedienfeld des T5 MASTER und des T5 EVO PLUS




Bedienfeld des V8 TOUCH

VDS

Welche Vorteile hat das VDS

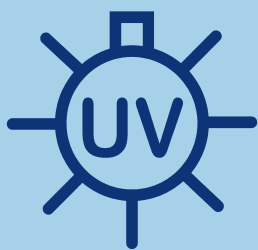

Keimreduzierende Behandlung des Trinkwasser mit UV Strahlen beim Eintritt in die Behandlungseinheit

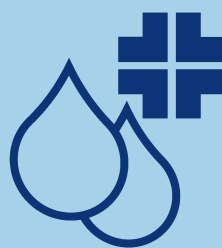

Desinfektion des Wasserzykluses der Einheit mit dem Multiclean Breitspektrum Desinfektionsmittel



Desinfektion durch den sterilen Filter am Lufteingang der Einheit



Bei allen zahnärztlichen Eingriffen, die höhere Sicherheitsstandards erfordern, kann eine sterile Lösung anstatt dem normalen Trinkwasser verwendet werden

Achten Sie beim Kauf Ihrer neuen Behandlungseinheit auf Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitarbeiter und Patienten und wählen Sie eine **VITALI** Einheit mit integriertem **VDS**

Sehen Sie dieses Video an



LIFELONG DENTAL UNITS

VITALI

www.vitali.com