


VDS

VITALI DISINFECTION SYSTEM

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ И САНИТИЗАЦИИ УСТАНОВКИ

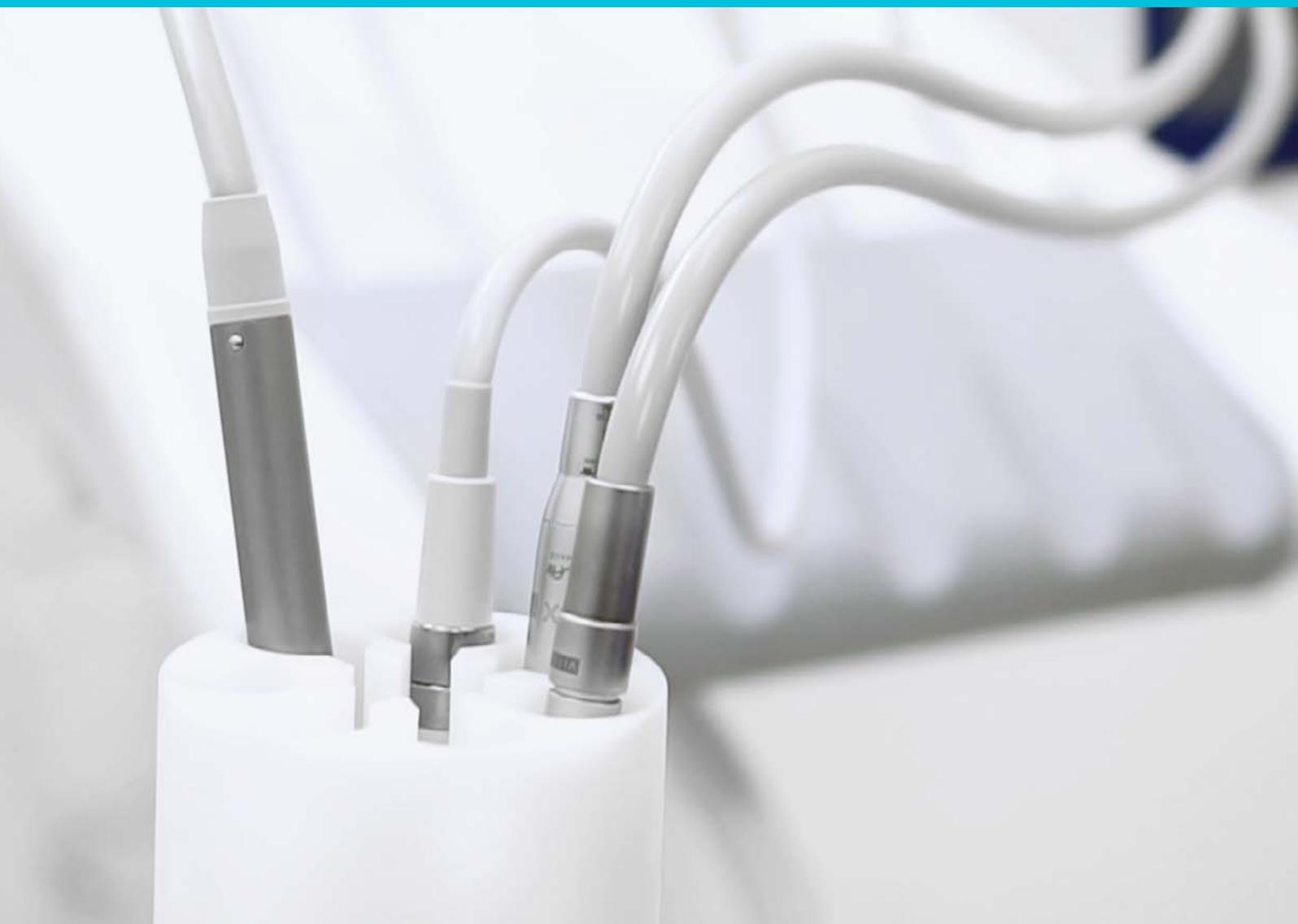

LONGLIFE DENTAL UNITS

VITALI

www.vitali.com


VDS

Решение MADE IN VITALI проблемы дезинфекции и санитизации установки

VDS (Vitali Disinfection System) - это наша сертифицированная система дезинфекции и санитизации стоматологической установки: она была задумана в отделе Исследований и Разработок **VITALI** и проверена квалифицированными лабораториями.

VDS - это сложное устройство, которое сочетает в себе передовые технологии, медицинское оборудование и проверенные процедуры. Было доказано, что **VDS** эффективно сокращает бактериальное заражение, присутствующее в контурах подачи воды к инструментам, способствуя замедлению формирования биоплёнки. Медицинское средство **Multiclean**, используемое для дезинфекции, способно оказывать значительное противодействие бактериям (таким как *Legionella pneumophila*), грибкам, ВИЧ, ВГВ и ВГС.

По запросу все наши установки могут быть оснащены системой **VDS**. Интеграция, однако, должна быть организована при покупке: **VDS** не может быть применена к уже доставленной и используемой установке **VITALI**.

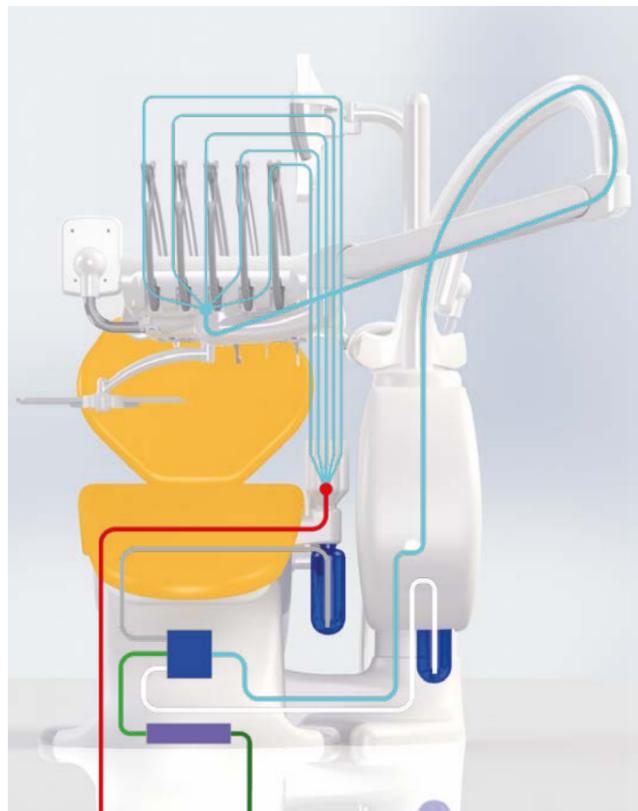

VDS

Элементы составляющие систему VDS



КОЛЛЕКТОР
в котором должны быть
размещены инструменты для
дезинфекции

ФЛАКОН
для дезинфицирующего
средства широкого спектра
действия Multiclean

ФЛАКОНЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
с использованием стерильной
жидкости вместо водопроводной
воды

**ФИЛЬТР ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
ВОЗДУХА**
при попадании в установку

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА
которая обрабатывает
водопроводную воду
при подаче к установке

**УСТРОЙСТВО ПРОТИВ
ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ**
которое предотвращает образование
известковых отложений в контурах



Стандартное расположение коллектора для инструментов



Расположение коллектора при наличии дренажного клапана плевательницы



Флакон для дезинфицирующего средства Multiclean



Флаконы под давлением для стерильной жидкости

VDS

Узнаем, как она работает

- Простая >** Система **VDS** полностью автоматическая и оснащена устройствами безопасности: ввести его в эксплуатацию очень просто.
- Безопасная >** Для вашей безопасности, вашего ассистента и ваших пациентов, рекомендуется проводить полную дезинфекцию контуров подачи воды к инструментам после каждой стоматологической процедуры.
- Практичная >** Просто поместите инструменты в коллектор, откройте краники спрей и активируйте систему.
- Быстрая >** Можно выбрать два цикла: **FAST** (продолжительностью 5 минут) и **SLOW** (продолжительностью 10 минут). В стоматологических установках **T5 MASTER** и **T5 EVO PLUS** все функции системы контролируются одной клавиатурой управления, а в **V8 TOUCH** управление может осуществляться непосредственно с сенсорного экрана.
- Защищённая >** Для максимальной безопасности, особенно в хирургическом лечении, **VDS** предлагает возможность использования стерильной жидкости вместо водопроводной воды. Эта опция представляет дополнительную защиту от заражения.




Клавиатура для T5 MASTER и T5 EVO PLUS



Клавиатура для V8 TOUCH

VDS

Вот что вы можете сделать с VDS

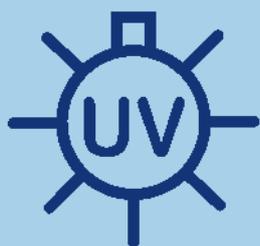

Обрабатывать ультрафиолетовыми лучами водопроводную воду при подаче к установке, тем самым кардинально сокращая возможную бактериальную нагрузку



Дезинфицировать водяной контур инструментов медицинским средством Multiclean широкого спектра действия




Обеззараживать воздух при подаче к установке с помощью стерилизующего фильтра



Использовать стерильную жидкость вместо водопроводной воды для всех стоматологических вмешательств требующих большей безопасности

При покупке следующей установки, подумайте хорошо над решением, которое может предложить больше безопасности вам, вашим сотрудникам и вашим пациентам: выбирайте установку **VITALI** с интегрированной системой **VDS**.

[нажмите здесь для просмотра видео](#)

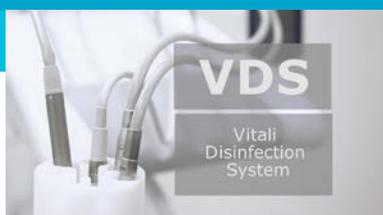

LONGLIFE DENTAL UNITS

VITALI

www.vitali.com